

AiVIA100

Instrukcja obsługi A-MIP 100 Instalacja i użytkowanie



Autoryzowany dystrybutor:

AGM Mitka Łabza sp. j.
ul. Balicka 116B lok. G
30-149 Kraków
NIP: 677-240-82-53

Informacje Ogólne

Ważne

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia AIVIA prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi oraz stosowanie się do jej wskazań.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych postępowaniem niezgodnym z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

AIVIA OCHRONA to szafka ochronna do montażu ściennego, przeznaczona do przechowywania i ochrony defibrylatora AED. AIVIA Ochrona nie zapewnia kontroli AED, jest to wyłączna odpowiedzialność DYSTRYBUTORA aby poinformować własnych SUB-DYSTRYBUTORÓW i UŻYTKOWNIKÓW o ich obowiązku weryfikacji obecności i statusu operacyjnego AED, przeprowadzając regularne kontrole w miejscu użytkowania.

W zależności od wybranych opcji, AIVIA OCHRONA może wywołać alarm dźwiękowy i świetlny. Alarm ma być sygnałem ostrzegawczym na wypadek jakiegokolwiek wadliwego działania, lecz nie zapisuje on rejestru awarii.

W żadnym wypadku obecność i status operacyjny AED w AIVIA OCHRONA nie może być kontrolowany na odległość. AIVIA w żadnym wypadku nie może być substytutem kontroli i inspekcji zalecanych przez producenta defibrylatora.

Instalacja powinna być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego operatora autoryzowanego przez producenta AIVIA.

Nigdy nie instaluj urządzenia AIVIA w bezpośrednim świetle słonecznym. Nieogrzewana AIVIA musi być zainstalowana w umiarkowanej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta i specyfikacji defibrylatora.

Nieogrzewana AIVIA musi być zainstalowana w otoczeniu dostosowanym do temperatury pracy urządzenia. Należy również monitorować temperaturę otoczenia oraz kontrolować alerty z nią związane.

Charakterystyka AIVIA może ulec zmianie bez uprzedzenia. Producent AIVIA zastrzega sobie prawo do wykonywania wszelkich zmian w produkcie w dowolnym czasie, w tym nieograniczone modyfikacje wcześniej dostarczonych produktów.

Marka AIVIA jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Bezpieczeństwo

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy umieszczać urządzenia AIVIA w pobliżu otwartego płomienia.
- Należy zapewnić co najmniej 13cm odstepu wokół szafki AIVIA dla odpowiedniej wentylacji.
- Przechowuj AIVIA z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła. Nie umieszczaj AIVIA w pobliżu urządzeń, które generują ciepło. Nie umieszczaj niczego pod urządzeniem AIVIA.
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w szczelinach czy otworach szafki AIVIA.
- Nigdy nie instaluj urządzenia AIVIA w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie należy wystawiać urządzenia AIVIA na działanie wilgoci, gdy jej drzwi są otwarte.
- Mocowania muszą być dostosowane do rodzaju powierzchni do której szafka AIVIA będzie montowana.
- Producent nie odpowiada za nieprawidłową instalację, szkody z nią związane czy obrażenia ciała uzyskane w jej wyniku.

Gwarancja

Nie należy demontować żadnych elementów tworzących urządzenie AIVIA.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do jakichkolwiek otworów.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu AIVIA.

Nieprzestrzeganie warunków i zaleceń instrukcji powoduje utratę gwarancji.

Każda operacja lub procedura montażu wyraźnie zabroniona lub niezalecana w niniejszej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Informacje dotyczące środowiska

- W przypadku zwrotu urządzenia AIVIA, należy użyć wyłącznie oryginalnego opakowania.
- Nie należy wyrzucać urządzenia AIVIA lub jego opakowania wraz z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów w najbliższej okolicy. Korzystanie z systemów zbiórki pomaga chronić środowisko i zdrowie.
- Urządzenie Aivia wyposażone jest w baterie zgodne z przepisami UE (dyrektywy 2006/66 / WE i 2008/103 / WE). Baterie nie mogą być usuwane wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia zużytych baterii w najbliższej okolicy. Właściwa utylizacja zużytych baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie.



Konserwacja

UWAGA

AIVIA MOŻE ZAWIERAĆ BATERIE. ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU, JEŻELI ORYGINALNE BATERIE DOSTARCZONE DO UŻYCIA PRZEZ PRODUCENTA ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ NIEPRAWIDŁOWE BATERIE. PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANA BATERII MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH OPERATORÓW.

Regulacje

EN 55022:2006

EN 55024: 1998/ A1 : 2001/ A2 : 2003

Spis treści

Instalacja

Ważne	4
Opis urządzenia AIVIA	4
Etykieta identyfikacyjna	4
Pierwsze otwarcie	4
Instalacja baterii	5
Podłączenie urządzenia AIVIA	6
Montaż defibrylatora	7
Montaż plomb	7
Piktogramy	7

Użytkowanie

Praca w trybie nocnym	8
Tryb alarmowy	8
Korzystanie z urządzenia AIVIA	8
Po użyciu defibrylatora	8
Konserwacja urządzenia AIVIA	8

Rozwiązywanie problemów	9
--------------------------------	----------

Dane techniczne

Parametry mechaniczne	10
Parametry techniczne	10
Regulacje	10

Notatki	11
----------------	-----------



Instalacja

Ważne

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania AIVIA prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.


Nigdy nie instaluj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym. Wiąże się to z ryzykiem wystawienia defibrylatora na działanie nadmiernych temperatur.

Opis urządzenia AIVIA

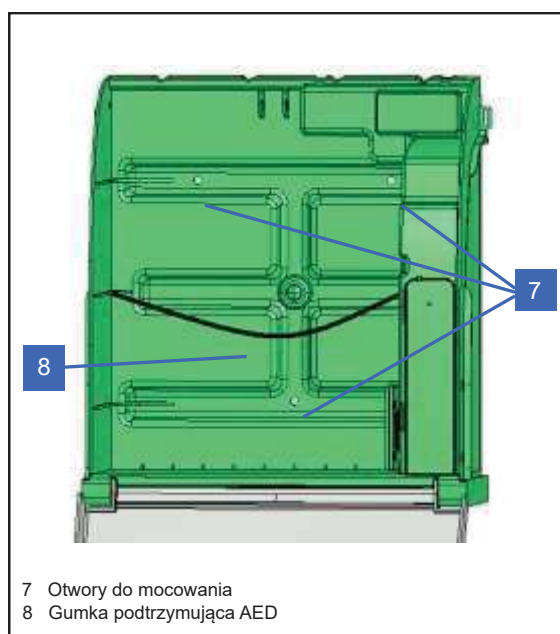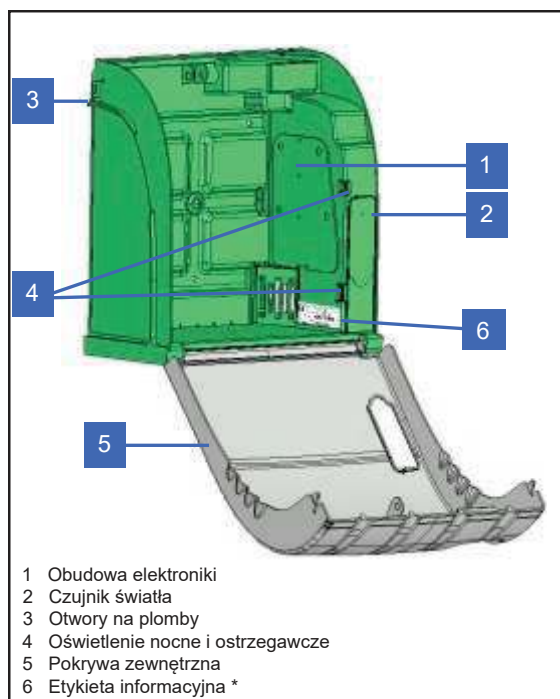

Etykieta identyfikacyjna


Etykieta identyfikacyjna znajduje się wewnątrz urządzenia AIVIA (rysunek po lewej stronie, pozycja 5)

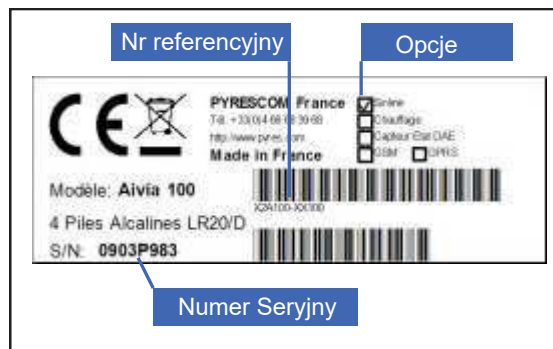

* Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta lub dystrybutorem upewnij się, że masz dostęp do numerów referencyjnego i seryjnego urządzenia AIVIA.

Pierwsze otwarcie

- Aby otworzyć pokrywę urządzenia AIVIA przed montażem ściennym, użyj małego śrubokrętu.
- Wsuń śrubokręt między drzwi i ramę urządzenia AIVIA.
- Podnieś śrubokręt, uważając, aby nie porysować żadnego z elementów.

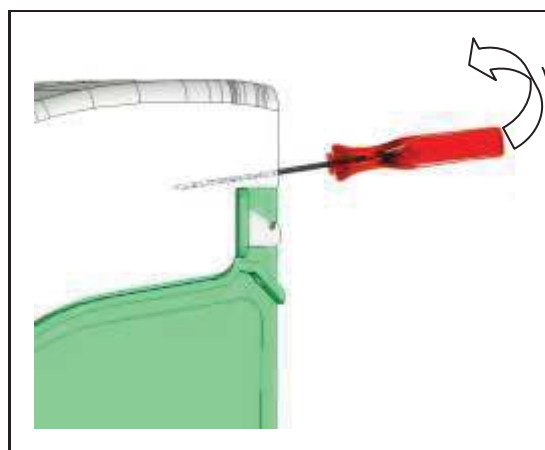

Powtórz czynność po obu stronach urządzenia AIVIA.

Instalacja

Instalacja urządzenia AIVIA

Nigdy nie instaluj AIVIA w bezpośrednim świetle słonecznym. Ryzykujesz wystawienie defibrylatora na nadmierne działanie wysokiej temperatury.


Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego operatora, który przestrzega karty Bornavie lub został autoryzowany przez producenta urządzenia AIVIA.

Jeśli urządzenie AIVIA jest instalowane na ulicy lub w miejscu publicznym, zainstaluj stałą płytę naziemną (zaczepek) lub kolumnę.


Mocowania muszą być odpowiednie dla rodzaju powierzchni, na której instalowane jest urządzenie AIVIA.

Strefa robocza urządzenia AIVIA musi być wolna jak określono na grafice poniżej.


Szczegółowe wymiary urządzenia AIVIA znajdują się na końcu niniejszego dokumentu w sekcji „Specyfikacje”

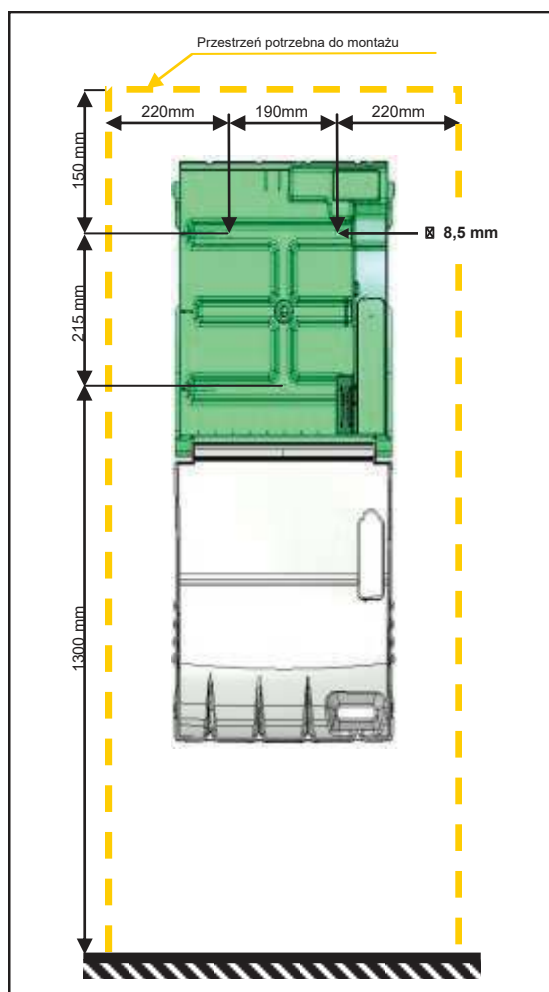


Pozostaw 140cm (ok. 55 cali) wolnej przestrzeni przed podtrzymującą ścianą, aby umożliwić łatwe otwieranie urządzenia AIVIA.

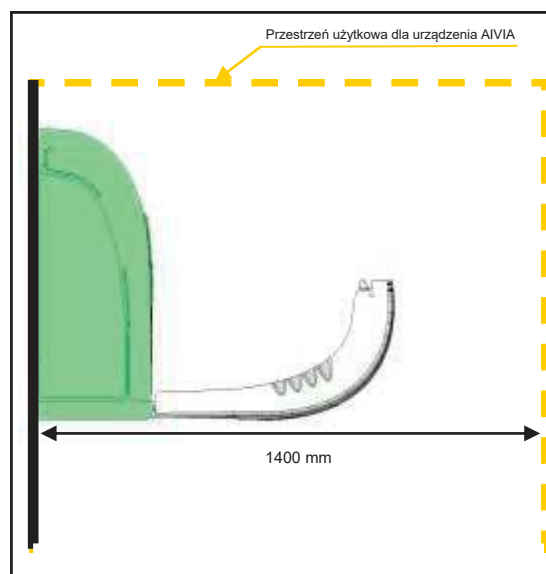

Aby prawidłowo oznaczyć miejsce mocowania urządzenia na ścianie, użyj szablonu do wiercenia załączonego do opakowania urządzenia AIVIA.

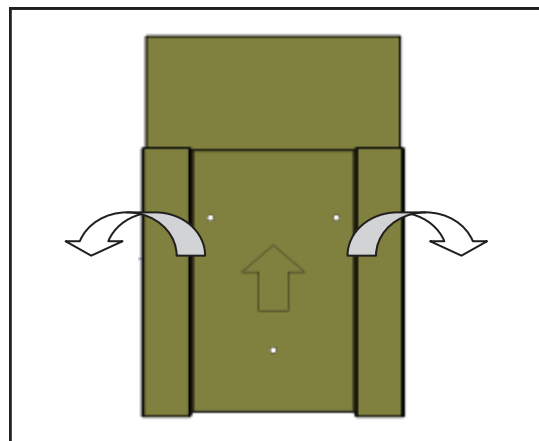


Umieść szablon na ścianie, strzałką skierowaną do góry, przodem do siebie.

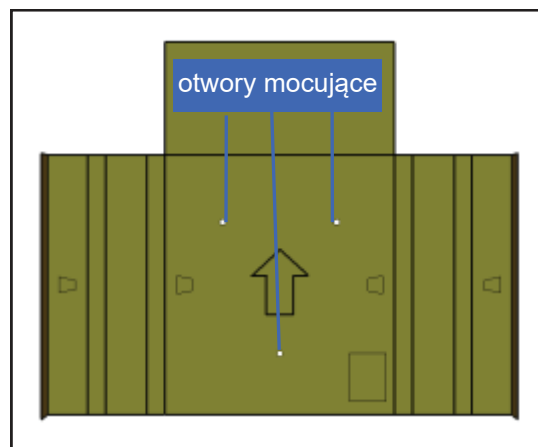

Instalacja

- Zastosuj odpowiednią metodę montażu dla typu podłoża, na którym instalowane jest urządzenie AIVIA.
- Mocowanie musi być w stanie wytrzymać minimalne obciążenie 20 kg.


Przykład montażu:

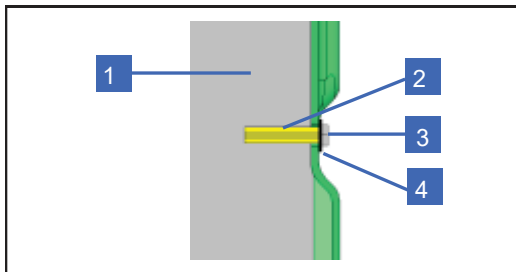

- 1 Wsparcie
 - 2 Kotwica
 - 3 Śruba mocująca, minimum M6, maks. M8
 - 4 Podkładka płaska maksymalnie 0,14 mm
- Zestaw podkładek pod główkę śruby nie może przekraczać 8mm grubości.

Użyj 3 otworów montażowych, aby zamontować urządzenie AIVIA.

Instalacja baterii

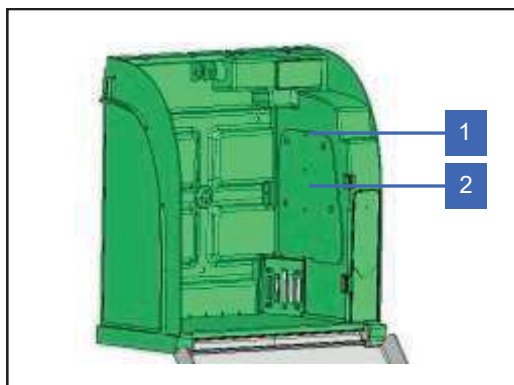


- 1 Śruby mocujące klapę dostępu do baterii
- 2 Klapa dostępu do baterii

Odkręć śruby montażowe za pomocą śrubokręta gwiazdowego.


Przesuń klapę do góry uważając, aby nie pociągnąć za przewód zasilający.



Włóż dostarczone 4 baterie o typu D zachowując biegunowość pokazaną na spodzie uchwytu baterii.

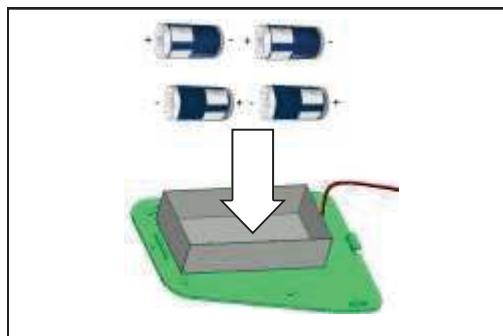

Upewnij się, że Aivia jest włączona poprzez sprawdzenie czy migają czerwone lampki ostrzegawcze.

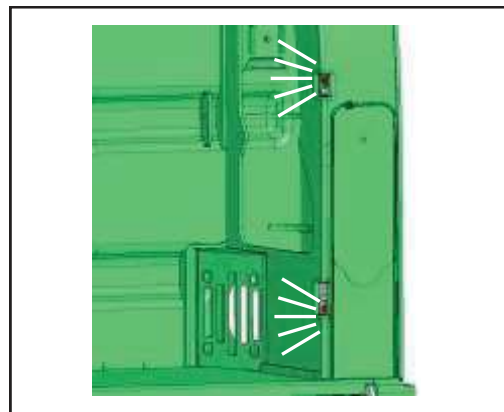

Aby założyć klapę dostępu do baterii, włóż ich dolną krawędź pierwszą.

Zakręć śruby montażowe za pomocą śrubokręta gwiazdowego.




Urządzenie Aivia wyposażone jest w baterie zgodne z przepisami UE (dyrektywy 2006/66 / WE i 2008/103 / WE). Baterie nie mogą być usuwane wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia zużytych baterii w najbliższej okolicy. Właściwa utylizacja zużytych baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie.

Installation

Montaż defibrylatora

Pociągnij uchwyt napinający defibrylatora i włóż defibrylator na spód urządzenia AIVIA.

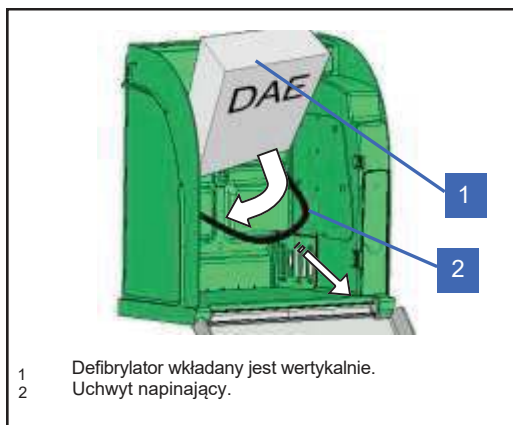


Uchwyt napinający pozwala na łatwe i prawidłowe wyciągnięcie defibrylatora w razie nagłej potrzeby.

Plomby


- Urządzenie AIVIA dostarczane jest z dwoma zestawami plomb
- Plomby wskazują, czy drzwi urządzenia AIVIA zostały otwarte
- Należy regularnie sprawdzać stan plomb

Montaż plomb

Dokładnie zamknij drzwi urządzenia AIVIA. Upewnij się, że stopka drzwi jest skierowana w Twoją stronę przed pociągnięciem jej.

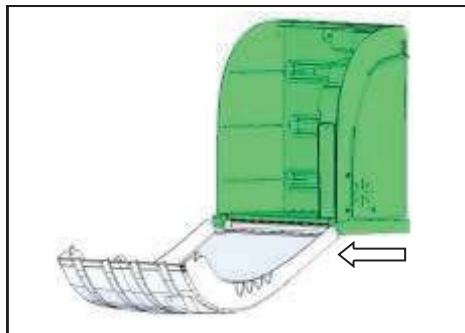


Przeciągnij całą linkę plombę przez dedykowany otwór w pokrywie urządzenia AIVIA.

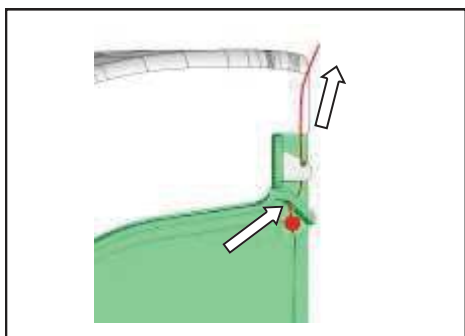


- Przeciągnij linkę przez drzwi urządzenia AIVIA
- Przeciągnij linkę przez plombę

A-MIP 100 V1.02


- Ciasno zaciągnij linkę, starając się jednocześnie jej nie przerwać. Upewnij się, że linka nie może zostać usunięta bez zerwania jej

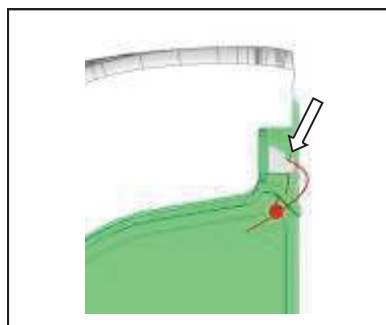

- Zaciśnij plombę cząstkami i odetnij nadmiar linki.

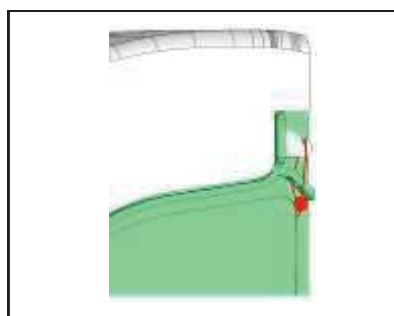

- Plomby muszą zostać zainstalowane po obu stronach urządzenia AIVIA

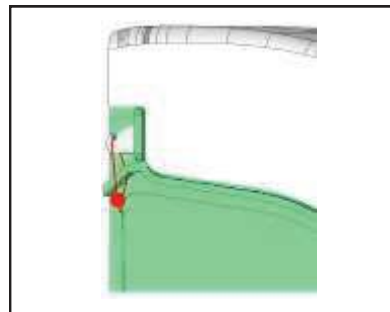

Piktogramy

- Oznaczenia umieszczone na obudowie urządzenia AIVIA wskazują, jak postępować w razie nagłego wypadku
- Upewnij się, że numer alarmowy został tam odpowiednio wskazany.



Użytkowanie

Praca w trybie nocnym

- Urządzenie AIVIA zostało wyposażone w miernik światła. W niskim natężeniu światła, mrugające na biało światła pomagają w zlokalizowaniu urządzenia AIVIA.

Tryb alarmowy

- Migające czerwone lampki wskazują kiedy drzwi urządzenia są otwarte.
- Jeśli Twoje urządzenie AIVIA zostało wyposażone w alarm dźwiękowy (Ref. X2A100-XX100), będzie ono nadawać sygnał dźwiękowy przez 3 minuty w przypadku otwartych drzwi urządzenia
- Aby wyłączyć alarmy świetlne i dźwiękowe należy zamknąć drzwi urządzenia.

Korzystanie z urządzenia AIVIA


Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego użycia defibrylatora to:

- **niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy**
- mów pewnym, wyraźnym tonem
- opisz zaistniałą sytuację i podaj miejsce zdarzenia najdokładniej jak potrafisz



Otwórz drzwi urządzenia AIVIA pociągając za górną część.

Włączy się ostrzeżenie wizualne w formie migającego czerwonego światła. Jeśli dostępne urządzenie AIVIA zostało wyposażone w alarm dźwiękowy (Ref. X2A100-XX100), będzie ono także nadawać sygnał dźwiękowy przez 3 minuty.

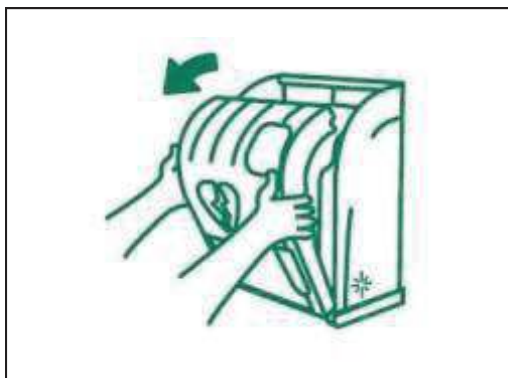

Wymij defibrylator



Podejdź do ofiary zdarzenia.

Aktywuj defibrylator.

Działaj zgodnie z instrukcjami na defibrylatorze.

Po użyciu defibrylatora

- Nie wkładaj defibrylatora z powrotem do urządzenia AIVIA bez uprzedniego przygotowania go do użycia.
- Aby przygotować defibrylator do ponownego użycia, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do defibrylatora
- W razie wątpliwości, skontaktuj się z producentem defibrylatora w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu go do ponownego użycia
- Po przygotowaniu defibrylatora do ponownego użycia, włóż go z powrotem do urządzenia AIVIA wedle instrukcji zawartych w sekcji "Montaż defibrylatora"
- Wymień plombę na nową zgodnie z sekcją "Montaż plomb" niniejszej instrukcji.

Konserwacja urządzenia AIVIA

- Do czyszczenia urządzenia AIVIA używaj miękkiej wilgotnej ściereczki, następnie wytrzyj urządzenie do sucha za pomocą miękkiej, czystej i suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych czy do czyszczenia, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia AIVIA.
- Nie czyść urządzenia AIVIA szorstkimi przedmiotami, gdyż mogą one zarysować lub permanentnie uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie używaj czyszczących urządzeń ciśnieniowych.
- Regularnie sprawdzaj stan plomb.
- Jeśli plombę urządzenia AIVIA zostały otwarte, upewnij się, że wszystkie części defibrylatora nadal znajdują się w urządzeniu AIVIA i działają poprawnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem defibrylatora.

Czerwone diody nie działają choć baterie zostały zainstalowane.

1. Sprawdź czy baterie zostały poprawnie zainstalowane (+/-).
2. Sprawdź przewód łączący baterie z diodami.
3. Wymień baterie na nowe.
4. Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.

Czerwone diody nie świecą gdy drzwi urządzenia są otwarte.

1. Wymień baterie na nowe.
2. Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.

Białe diody nie świecą lub świecą słabo w trybie pracy nocą.


1. Wymień baterie na nowe.
2. Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.

Alarm dzwinkowy nie uaktywnia się, gdy drzwi urządzenia są otwarte.

1. Sprawdź opcję alarmu dzwinkowego na etykiecie identyfikacyjnej
2. Wymień baterie.
3. Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

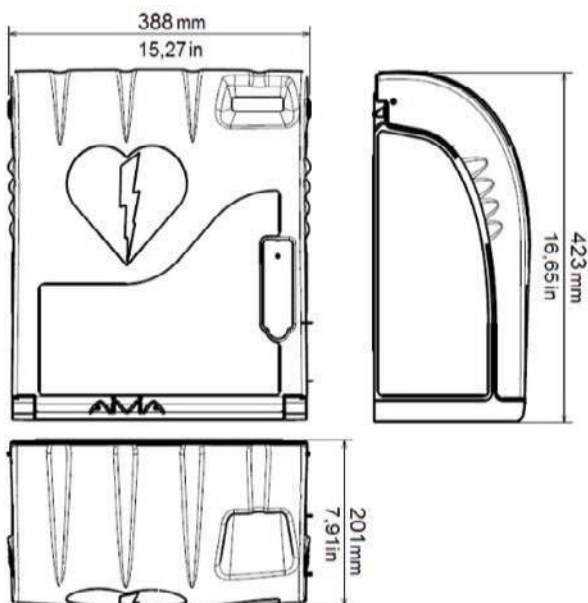

Waga załączonych baterii:

X2A100-XX000: 3,3kg

X2A100-XX100 (z alarmem dźwiękowym): 3,6kg

Materiały:

Drzwi: poliwęglan

Rama: ABS

Wspornik: ABS

Kłapa: ABS

Parametry elektryczne

Źródło zasilania:

Cztery baterie alkaiczne LR20 (typu D), 13Amp

Zużycie energii

X2A100-XX000: min. 0,8mA; max 75mA

X2A100-XX100 (z alarmem dźwiękowym): min 0,8mA;
max 450mA

Głośność

X2A100-XX100 (z alarmem dźwiękowym): 90db/1m

Temperatura podczas pracy urządzenia:

minimalna: 0°C

maksymalna: 40°C

Działanie:

Ponad 1 rok przy założeniu pracy w trybie nocnym
przez 12 godzin na dobę

Regulacje

EN 55022:2006

EN 55024: 1998/ A1 : 2001/ A2 : 2003

Notatki
