

# AED SAFETY BOX

Safe storage. Easy access.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Szafki na AED do zastosowań wewnętrznych



### Alarm dźwiękowy

Wystarczająco głośny w każdych warunkach - jako zabezpieczenie i sygnalizacja wezwania pomocy.



### Alarm LED

Czerwone błyskowe światło LED przyciąga uwagę. Niezauważalne gdy wyłączone.




### Potrzebujesz dodatkowej ochrony? Wybierz zamek na klucz!


Każda szafka może być wyposażona w zamek na klucz i system "zbij szybkę". System ten zapewni łatwy dostęp i bezpieczeństwo przechowywanych urządzeń AED.

## 1. ROZPAKOWANIE SZAFKI Z OPAKOWANIA

Wyjmij szafkę z opakowania, oceń urządzenie pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas dostawy. Po sprawdzeniu, że urządzenie jest wolne od jakichkolwiek uszkodzeń, możesz przystąpić do instalacji.

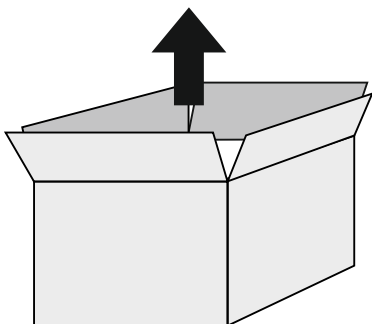


Rozpakuj szafkę z pudełka.

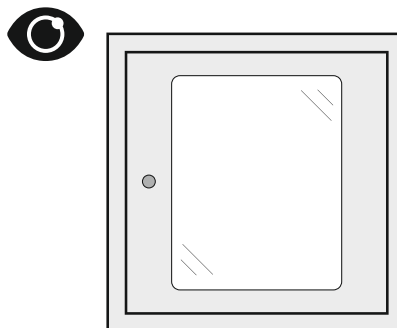


Oceń wszystkie powierzchnie pod kątem uszkodzeń.

## 2. ODKRĘĆ UCHWYT Z WEWNĘTRZNEJ OBUDOWY I UMIEŚĆ GO Z PRZODU OBUDOWY.

Otwórz drzwiczki szafki, po otwarciu drzwi znajdziesz uchwyt przykręcony do wewnętrznej strony drzwiczek, odkręć śrubę i uchwyt, a następnie przykręć ponownie uchwyt na zewnątrz drzwiczek.

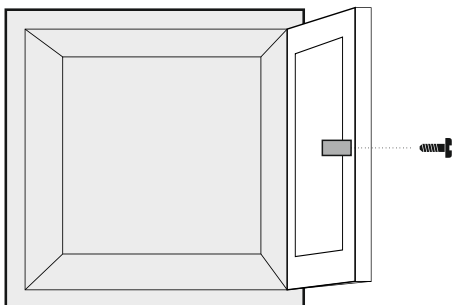

Odkręć uchwyt od wewnątrz.

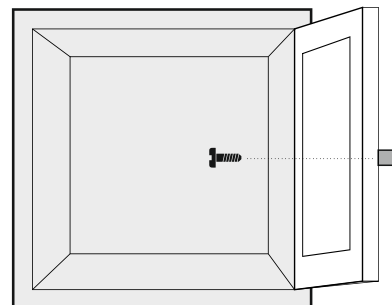


Przykręć ponownie na zewnątrz drzwi.

## 3. W PRZYPADKU SZAFEK Z ALARMEM AKTYWUJ ALARM / WYMIENŲ BATERIE


Otwórz drzwiczki szafki, aktywuj alarm, poprzez usunięcie taśmy zabezpieczającej (pociągnij ją w dół) z modułu alarmu. Po aktywacji alarmu, alarm świetlny i dźwiękowy włącza się po otwarciu drzwiczek.

Aby wymienić baterie (3 x AAA), odkręć i wyjmij kieszeń z alarmem, zmień baterie na nowe i z powrotem przykręć kieszeń modułu alarmu.

**UWAGA:** Podczas transportu może dojść do przemieszczenia baterii. Jeśli alarm nie zostanie aktywowany po wykonaniu kroku 2, należy przejść do kroku 3, aby wyjąć baterie i umieścić je z powrotem.

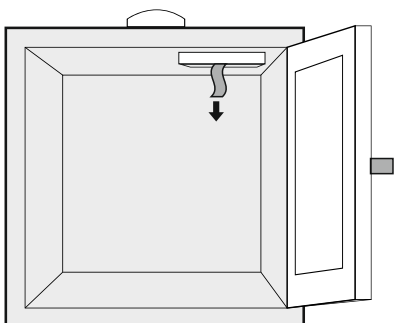

Aby aktywować alarm,  
Usuń taśmę zabezpieczającą pociągając ją w dół.

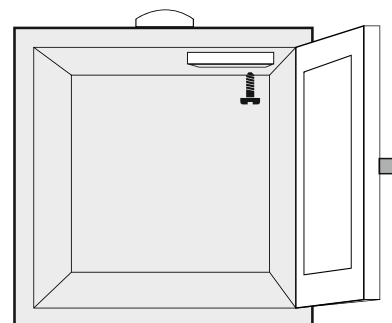

Odkręć i wyjmij kieszeń z alarmem w celu wymiany baterii.

#### 4. WYBIERZ MIEJSCE MONTAŻU SZAFKI


Określ miejsce montażu szafki i zaznacz je na ścianie. Tylny panel szafki zawiera 3 wstępnie wywiercone otwory które mogą posłużyć jako szablon.

Szafkę należy przymocować do ściany za pomocą trzech śrub. Przed instalacją należy upewnić się, że przygotowane wkręty (i opcjonalnie kołki rozporowe) są odpowiednie dla danej ściany. Jeśli nie, należy wybrać inne, odpowiednie akcesoria.


**UWAGA:** Śruby NIE są elementem wyposażenia szafki ze względu na różne rodzaje powierzchni, na której może być montowana szafka.

W zależności od powierzchni montaż może wymagać zastosowania dodatkowych elementów takich jak np. kołki rozporowe.

Szafka powinna zostać zamocowana do ściany za pomocą śrub o średnicy minimum 8 mm.

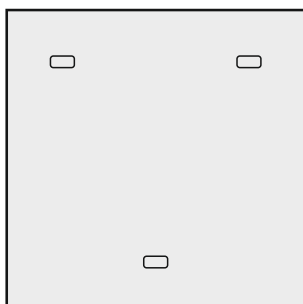


Tył szafki posiada 3 otwory montażowe.

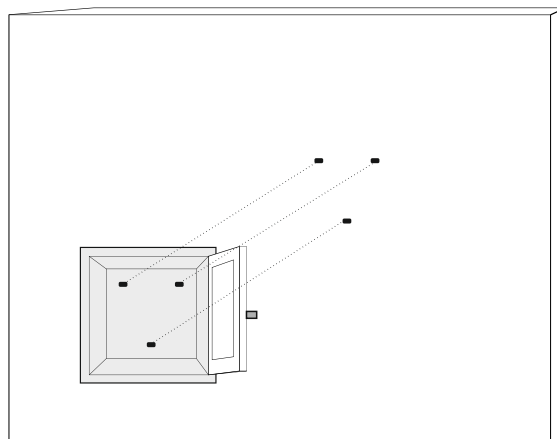


Określ miejsce montażu szafki i zaznacz je na ścianie

#### 5. MONTAŻ SZAFKI

Przyłóż szafkę do ściany tak aby otwory montażowe szafki pokrywały się z zaznaczeniem lub wcześniej wywierconymi otworami. Umieść śruby w otworach tylnego panelu szafki i wkręć je w ścianę.

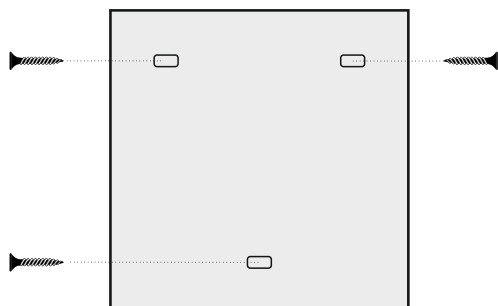

Umieść śruby w otworach w tylnym panelu i przykręć szafkę do ściany.

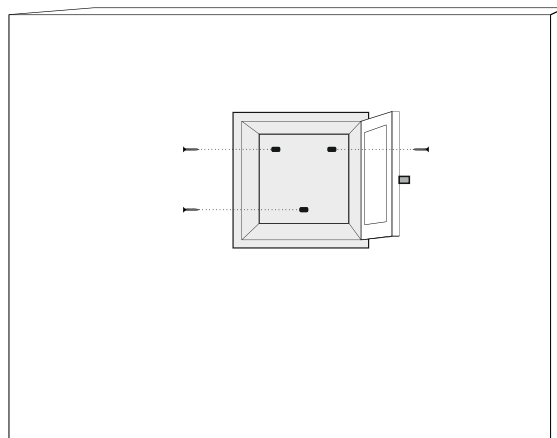

Określ miejsce montażu szafki i zaznacz je na ścianie

#### WAŻNE INFORMACJE:

- DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKU.
- Zamek magnetyczny lub na kluczyk.
- Duże okienko inspekcyjne.
- Alarm dźwiękowy i świetlny zasilany bateryjnie.
- Czerwone oznaczenie AED na bokach szafki.
- Wyprodukowane w Polsce.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiar: 37 x 37 x 17 cm (z kogutem 37 x 38 x 17 cm).
- Waga: 4 kg (+/- 0,5 kg)
- Materiał : blacha stalowa, malowana proszkowo.
- Okienko inspekcyjne: pleksi.
- Okienko „zbij szybkę”: szkło
- Zasilanie: 3 x bateria AAA.
- Gwarancja 2 lata.

#### PRODUCENT

AGM Łabza sp. z o.o.  
ul. Balicka 116B lok. G  
30-149 Kraków

