

AED TRAINER

ATM-112



Wprowadzenie

Defibrylator treningowy ATM-112 jest przeznaczony do efektywnego szkolenia pracowników służb ratowniczych w zakresie stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Ta jednostka szkoleniowa zapewnia szereg wstępnie zaprogramowanych scenariuszy, aby pomóc użytkownikom zapoznać się z AED i umożliwić im wykazanie się podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do użycia AED w sytuacji awaryjnej.

ATM-112 zapewnia symulację dostarczania impulsów defibrylacji, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas szkolenia i nie ma możliwości dostarczenia wysokiego napięcia oraz nie może dostarczyć prawdziwych wyładowań.


UWAGA: Przed użyciem prawdziwego klinicznego AED użytkownik powinien mieć ukończony odpowiedni program szkoleniowy. Po ukończeniu takiego szkolenia powinien on wykazać się biegłością w wykonywaniu podstawowych umiejętności w zakresie podtrzymywania życia; oraz znajomością obowiązujących protokołów i procedur medycznych.

Opis

Zawartość zestawu

Urządzenie, Pilot zdalnego sterowania, Elektrody treningowe (Dla dorosłych: 1 para, Pediatriczne: 1 para), Złącza kabli, instrukcja obsługi, etui, zasilacz.



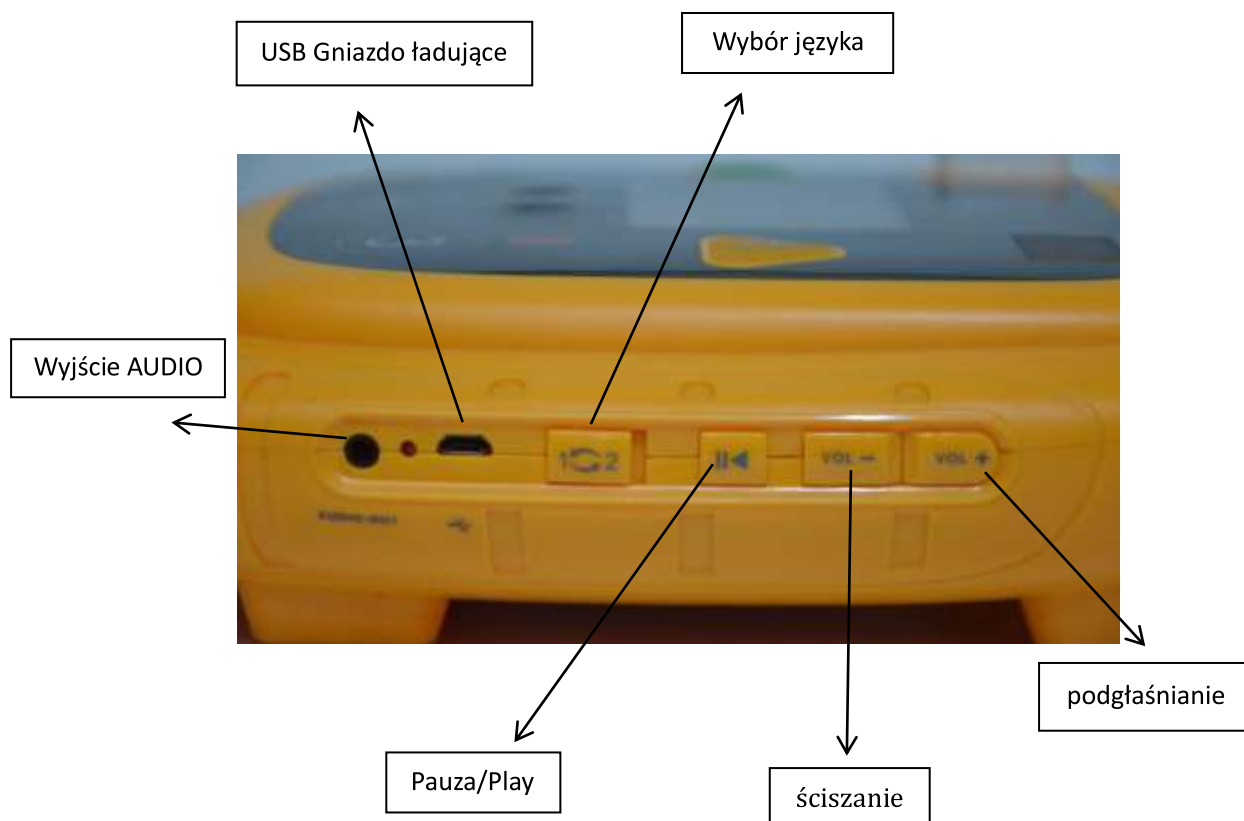

Jednostka centralna

1. Przycisk Włącz/Wyłącz

Włącz urządzenie, aby zainicjować komunikaty głosowe. Naciśnij raz, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

2. Gniazdo elektrod

Włóż złącze elektrod treningowych do gniazda. Zarówno migająca lampka kontrolna, jak i ekran LCD wskazują lokalizację gniazda.

3. Regulacja głośności

Kontroluj głośność komunikatów głosowych podczas ich używania.

4. Przycisk wstrząsu

Włącz symulowane dostarczanie wstrząsów. Ekran przycisków i LCD miga, gdy urządzenie jest gotowe do dostarczenia symulowanego wstrząsu.

5. USB Gniazdo ładujące

Do ładowania wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego należy używać zasilacza ATM-112 AED Trainer z certyfikatem.

Bateria (3,7V /4000mAh).

(Uwaga: Nie należy używać urządzenia ATM-112, gdy podłączony jest zasilacz)

6. Wyjście AUDIO


Wszystkie zewnętrzne głośniki mogą być podłączone do urządzenia.

7. Pauza / Play

Funkcja pauzy może tymczasowo zatrzymać wszystkie operacje urządzenia. Naciśnij raz, aby wstrzymać. Naciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.

Pilot zdalnego sterowania

Funkcje przycisków sterujących są opisane poniżej (patrz diagram).

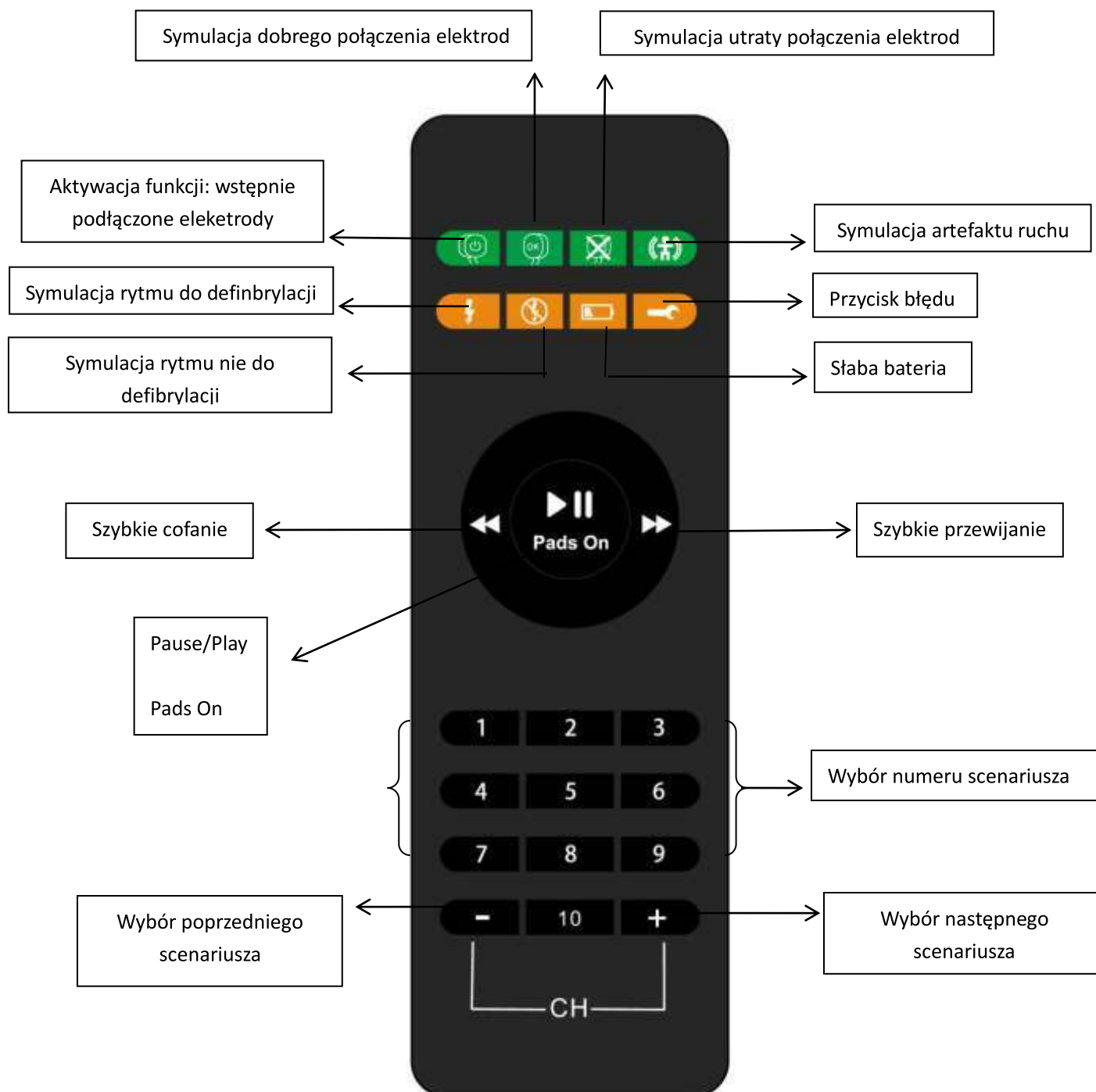

1. PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY FUNKCJĘ WSTĘPNIE PODŁĄCZONYCH ELEKTROD

Użytkownicy uczą się jak nakleić elektrody. Zasymuluj ten proces.

Funkcja w pełni automatyczna.

2. SYMULACJA DOBREGO POŁĄCZENIA ELEKTROD

Podczas treningu, jeśli ten przycisk zostanie wciśnięty, "" będzie wyświetlany na ekranie LCD. Symuluje on dobre podłączenie elektrod. Użytkownik może wybrać odpowiednie scenariusze do treningu.

3. SYMULACJA UTRATY POŁĄCZENIA ELEKTROD

Podczas treningu, jeśli przycisk zostanie wciśnięty, "" zostanie wyświetlony na ekranie LCD. Symuluje on połączenie luźnych elektrod. Użytkownik może wybrać odpowiednie scenariusze do treningu.

4. SYMULACJA ARTEFAKTU RUCHU

Podczas treningu, jeśli przycisk zostanie wciśnięty, "" zostanie wyświetlony na ekranie LCD.

5. SYMULACJA RYTMU DO DEFIBRYLACJI

Podczas treningu, jeśli przycisk zostanie wciśnięty, "" zostanie wyświetlony na ekranie LCD. Symuluje to rytm do defibrylacji. Użytkownik może wybrać odpowiednie scenariusze do ćwiczenia.

6. SYMULACJA RYTMU NIE DO DEFIBRYLACJI

Podczas treningu, jeśli przycisk zostanie wciśnięty, "" zostanie wyświetlony na ekranie LCD. Symuluje to rytm nie do defibrylacji. Użytkownik może wybrać odpowiednie scenariusze do ćwiczenia.

7. SŁABA BATERIA

Podczas treningu, jeśli przycisk zostanie wciśnięty, "" zostanie wyświetlony na ekranie LCD. Pojawia się komunikat głosowy "niski poziom naładowania baterii", a następnie kontynuowany jest bieżący scenariusz.

8. PRZYCISK BŁĘDU

Podczas treningu, jeśli przycisk ten zostanie wciśnięty, daje on dźwięk "tick" oraz "" zostanie wyświetlony na ekranie LCD, komunikaty głosowe zostaną zatrzymane, dźwięk "tick" zostanie podany ponownie po 10 sekundach i będzie kontynuowany do momentu wyłączenia trenera AED.

9. PAUZA / PLAY

Podczas treningu, naciśnięcie przycisku wywoła jego zatrzymanie, ponowne naciśnięcie wznowi pracę.

10. WYBÓR SCENARIUSZA

Wybierz numer scenariusza.

11. WYBÓR SCENARIUSZA / Góra i dół

Po naciśnięciu jednego z tych przycisków na wyświetlaczu pojawia się komunikat o zmianie wyboru scenariusza.

Specyfikacja i opis urządzenia

Model.: ATM-112

Nazwa: AED Trainer

Zasilanie: DC 3.7V / Bateria litowo-polimerowa 4000mAh

Maksymalny pobór: <300mA

Wymiary: 260x230x50mm

Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie: 2xAAA battery

Prąd stały: <5μA

Maksymalny pobór: <10mA

Opis produktu



Nr	Część	Ilość	Miara	Uwaga
1	Jednostka centralna	1	szt.	
2	Pilot	1	Szt.	

3	Złącze kabli	1	szt.	
4	Elektrody dla dorosłych	1	para	Wielokrotnego użytku
5	Elektrody pediatryczne	1	para	Wielokrotnego użytku
6	Instrukcja obsługi	1	szt.	
7	Etui	1	szt.	Torba EVA
8	Zasilacz	1	szt.	Gniazdo USB

Elektrody treningowe



UWAGA: Elektrody szkoleniowe są przeznaczone wyłącznie do użytku szkoleniowego i nie będą działały z klinicznym AED.

Instrukcja obsługi

Najpierw należy włączyć urządzenie i wybrać scenariusz szkolenia.

Włącz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk wyboru scenariusza, aby wybrać zaprogramowany scenariusz treningu - scenariusz operacyjny jest wyświetlany w oknie wyświetlacza LCD.

Uwaga: Ostatnie ustawienie zostanie zapisane i zachowane nawet po wyłączeniu urządzenia.


Następnie podłącz elektrody.

- Wyjmij elektrody treningowe
- Połącz przewód z elektrodami treningowymi.
- Umieść elektrody na klatce piersiowej manekina w pozycji pokazanej na schematach.
- Po wyświetleniu monitu, podłącz wtyczkę do trenera AED za pomocą gniazda z migającym zielonym wskaźnikiem świetlnym (również kolorowy wyświetlacz pomoże Ci zlokalizować gniazdo).

Uwaga:


- Nie należy nadmiernie zginać ani rozciągać przewodów.

- Proszę przytrzymać złącze elektrod przy wyciąganiu go z urządzenia.

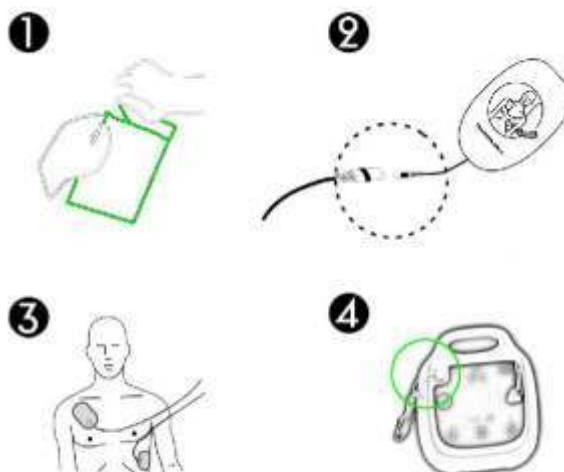

W kroku trzecim postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi

Zgodnie z wybranym scenariuszem, należy obsługiwać urządzenie stosując się do komunikatów głosowych.

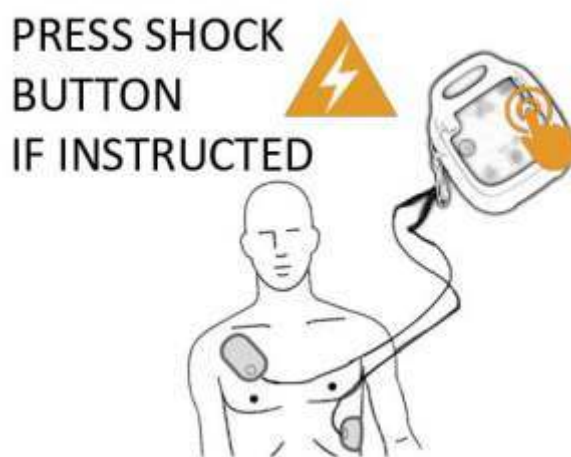

Wskazówki dotyczące przechowywania

Konserwacja elektrod

- Strona żelowa elektrod powinna być czysta i wolna od kurzu.
- Po użyciu naklej je na oryginalną podkładkę ochronną.
- Jeśli elektrody zaczynają kleić się słabiej spróbuj umyć je wodą przez kilka sekund, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia..
- Nie należy wycierać żelowej strony elektrod papierem ani szmatką.
- Nie należy zeszkrobywać żelowej strony elektrod paznokciem czy szczotką.
- Elektrody powinny wystarczyć na kilka sesji szkoleniowych.
- Nie myj elektrod często, nie korzystaj z detergentów ani gorącej wody.
- Nie należy przechowywać elektrod w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub wilgoci.

Konserwacja urządzenia

- Rutynowo wycieraj urządzenie.
- Po wyłączeniu zasilania należy wyciągnąć wtyczkę elektrod z urządzenia.
- Jeśli główne urządzenie jest brudne, należy użyć miękkiej, wilgotnej szmatki z wodą lub neutralnym detergentem i delikatnie przetrzeć. W razie potrzeby oczyścić lub wysterylizować szmatkę nasączoną alkoholem medycznym (maks. 75% stężenia).
- Nie należy używać ściernych środków czyszczących.
- Do czyszczenia należy używać tylko ściereczki nieściernej. Nie wolno zanurzać jednostki szkoleniowej w żadnym płynie.

Środki ostrożności w zakresie przechowywania

- Nie przechowywać w pobliżu alkoholi i benzyny.
- Nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgoci, pyłu lub gazu korozyjnego.
- Przechowywać główne urządzenie, elektrody, przewody druciane i instrukcję obsługi w dostarczonej torbie.

* Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może spowodować utratę gwarancji.

Pre-programmed Scenarios 1-10

Scenariusz	Opis	Czynności
1	Pojedyncza defibrylacja	● Naklej elektrody (pauza) ● Elektrody przyklejone ● Rytm do defibrylacji ● 1 wyładowanie ● RKO ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (powtarzanie cyklu)
2	Migotanie komór- Wymagane wielokrotne wstrząsy	● Rytm do defibrylacji ● 4 wyładowania ● RKO między wstrząsami ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie powtarzanie cyklu)
3	Migotanie komór - Pojedynczy wstrząs	● Rytm do defibrylacji ● 1 wyładowanie ● RKO ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie powtarzanie cyklu)
4	Migotanie komór - Dwa wyładowania zalecane	● Rytm do defibrylacji ● 2 wyładowania ● RKO między wstrząsami ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie powtarzanie cyklu)
5	Rytm nie do defibrylacji	● Rytm nie do defibrylacji

		● RKO (następnie powtarzanie cyklu)
6	Migotanie komór - Z dwoma zalecanymi wstrząsami	● Rytm do defibrylacji ● 2 wyładowania ● RKO między wstrząsami ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie restart scenariusza)
7	Migotanie komór - Z trzema zalecanymi wstrząsami	● Rytm do defibrylacji ● 3 wyładowania ● RKO między wstrząsami ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie powtarzanie cyklu)
8	Umiejętność rozwiązywania problemów - Elektrody, dwa zalece wstrząsy	● Złe naklejenie elektrod ● Rytm do defibrylacji ● 2 wyładowania ● RKO między wstrząsami ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie powtarzanie cyklu)
9	Migotanie komór	● Rytm do defibrylacji ● 1 wyładowanie ● RKO ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie restart scenariusza)
10	Umiejętność rozwiązywania problemów - Ruch, niski poziom baterii	● Wykryty ruch ● Rytm do defibrylacji ● 1 wyładowanie ● RKO ● Słaba bateria ● Rytm nie do defibrylacji ● RKO (następnie powtarzanie cyklu)

Scenariusz 1:

Mocno dociśnij elektrody do nagiej klatki piersiowej pacjenta --Stop10S--

(Stan pauzy), a następnie w razie potrzeby kontynuować, nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząsy zalecane --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Wstrząs nie zalecany --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację

--Stop 2MIN--

(Powtarzanie)

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij reanimację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz się zaczyna).

(Ale komunikat przyciśnij mocno elektrody do nagiej klatki piersiowej pacjenta nie będzie odtwarzany.)

Scenariusz 2:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk "shock" zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy:

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Wstrząs zalecany --Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--
Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk
(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").
(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):
Wstrząs wykonano --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację.
--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Wstrząs zalecany --Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--
Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk
(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").
(Jeśli przycisk "shock" zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy:
Wstrząs wykonany --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację.
--Stop2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Wstrząs nie zalecany --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację
--Stop 2MIN--
(Powtarzanie)

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--
Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--
Rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).
--Stop2MIN--
(Potem scenariusz restartuje się).

Scenariusz 3:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs dostarczono --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Wstrząs nie zalecany --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację

--Stop 2MIN--

(Powtarzanie)

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, wciśnij pomarańczowy przycisk -Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz restartuje się).

Scenariusz 4:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop2 MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Wstrząs zalecany --Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--
Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk
(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").
(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):
Wstrząs dostarczono --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację.
--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Wstrząs nie zalecany --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację
--Stop 2MIN--
(Powtarzanie)

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--
Wykonaj teraz wstrząs, wciśnij pomarańczowy przycisk -Stop6S--
Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację.
--Stop 2MIN--
(Potem scenariusz restartuje się).

Scenariusz 5:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Wstrząs nie zalecany --Stop2S--
Rozpocznij resuscytację
--Stop 2MIN--
(Powtarzanie)

Scenariusz 6:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs dostarczono --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs dostarczono --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Wstrząs nie zalecany --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację

--Stop 2MIN--

(Powtarzanie)

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy): --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, wciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz restartuje się).

Scenariusz 7:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop2 MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop2 MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop2 MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Wstrząs nie zalecany --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację

--Stop 2MIN--

(Powtarzanie)

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy): --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, wciśnij pomarańczowy przycisk -Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz restartuje się).

Scenariusz 8:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop 0.1S --

Mocno dociśnij elektrody do nagiej klatki piersiowej pacjenta --Stop10S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy i należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs wykonano --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN—

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Wstrząs nie zalecany --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację

--Stop 2MIN--

(Powtarzanie)

Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz się zaczyna).

(Ale komunikat przyciśnij mocno elektrody do nagiej klatki piersiowej pacjenta nie będzie odtwarzany.)

Scenariusz 9:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik wydaje dźwięk alarmowy I należy nacisnąć przycisk "shock").

(Jeśli przycisk defibrylacji zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy):

Wstrząs dostarczono --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz restartuje się).

(Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, wciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz restartuje się).

Scenariusz 10:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Analiza przerwana --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop 12S--

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop2S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk

(Lampka sygnalizacyjna miga, głośnik ma sygnał alarmowy i naciśnij przycisk wstrząsowy.)

(Jeśli przycisk "shock" zostanie wciśnięty, pojawi się komunikat głosowy:

Wstrząs zalecany --Stop2S--

Rozpocznij reanimację.

-Stop 25S—

Słaba bateria

--Stop 120S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Wstrząs nie zalecany --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację

--Stop 2MIN--

(Powtarzanie)

Jeśli przycisk "shock" nie zostanie naciśnięty, pojawi się komunikat głosowy: --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Wykonaj teraz wstrząs, naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Przycisk "Shock" nie został wciśnięty. --Stop2S--

Rozpocznij resuscytację.

--Stop 2MIN--

(Potem scenariusz się zaczyna).

(Ale komunikat przyciśnij mocno elektrody do nagiej klatki piersiowej pacjenta nie będzie odtwarzany.)

Bezpośrednią sekwencją jest

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--

Wstrząs zalecany....

Dystrybutor na terenie Polski

Integra Medical sp. z o.o.
ul. Balicka 116B lok. G
30-149 Kraków
NIP: 6772408253



Dane kontaktowe

handel@integramedical.pl
+48 12 346 40 51

